

## Mode d'emploi masques réutilisables au moins 30 fois



Lavez votre masque après chaque utilisation à 60°C minimum durant un cycle de 30 minutes en utilisant votre lessive habituelle.



Séchez votre masque en sèche-linge dans les 2 heures après le lavage ou séchage à l'air libre et repassage vapeur à température maximum



Se laver les mains à l'eau et au savon ou avec une solution hydroalcoolique avant toute manipulation du masque, évitez de toucher l'intérieur du masque



Mettez le masque en vous aidant des liens. Une fois en place, ne pas le toucher, ni l'enlever



Changez de masques toutes les 4 heures maximum et le mettre immédiatement dans un sac jusqu'au lavage



Après avoir enlever le masque, se laver les mains au savon ou avec du gel hydroalcoolique



Le port du masque ne vous exonère pas des gestes barrières, respecter les mesures d'hygiène, gardez une distance d'un mètre et lavez vous les mains le plus souvent possible

**Prenez soin de vous et de vos proches**